



09.04 Control de mastitis en vacas de postparto. Uso de Mastimilk.

La gran rentabilidad de Mastimilk esta en las vacas, ovejas, cabras, camellas y yeguas de postparto. Permite conocer es estado mastítico del calostro de la vaca recién parida así como la predisposición de la ubre a mastitis de postparto.

Protocolos utilizados. Se diagnostican con Mastimilk, justo en el momento del parto, el calostro, y a los 3 días de postparto, considerando que ya no es calostro y por tanto ya consideramos la primera leche.

Anotar la lectura de mastimilk para cada uno de los cuarterones.

DIA 0

Si los 4 cuarterones marcan 0. Situación ideal. Se realiza una revisión a los 3 días de postparto.


Si un cuarteron marca 20 se tratará el cuarterón afectado con cánula según indicaciones del veterinario. Revisión a los 3 días

Si un cuarterón marca 40, o la suma de todos los cuarterones es igual o superior a 40, tratar toda la ubre según indicaciones del veterinario

DIA 3

Si los 4 cuarterones marcan 0. Situación ideal

Si algún cuarterón marca positivo se tratará toda la ubre

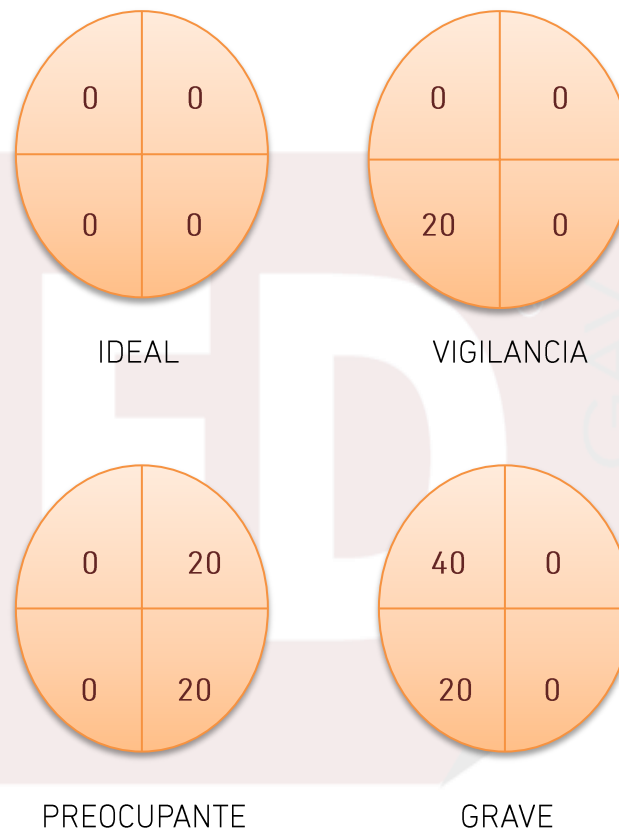

Ejemplo de lectura en el momento del parto.



Este sistema de detección precoz de mastitis, permite avanzarse a las mastitis clínicas típicas de postparto (4 – 8´ días de postparto). Siendo más eficaz los ttratamientos antimastíticos.