


## # 09.03 MASTIMILK. Interpretación sobre muestras de leche.



Video S.D.A.R. 09.03

Vamos a explicar de manera práctica como interpretar las lecturas de MASTIMILK en muestras de leche.

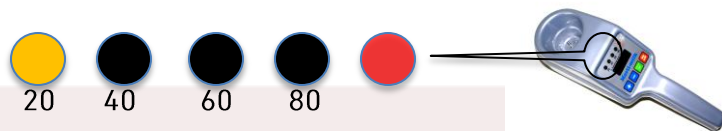

Si la lectura es 0, indica buen estado sanitario de la leche. Independientemente de sus niveles de calidad (proteína, grasa, lactosa, ...), recuento de células somáticas y/o nivel bacteriológico.

Si la lectura es 20, indica mastitis subclínica, bien que en 24 horas desarrollará mastitis clínica o bien que está en una fase de recuperación de un tratamiento de mastitis.

Según el estado de los animales e historial clínico, estas mastitis deben tratarse bien con antibiótico. Si las detectamos por primera vez, y sólo marca un cuarterón aconsejamos la utilización de gav-ALLFEED UDDER SPRAY.

Si la lectura es 40 o más, indica mastitis clínica, dependerá del grado de mastitis el valor de la lectura. No espere, ¡hay que tratarla debidamente con las pautas que le marque el veterinario.

Con MASTIMILK podrá asegurarse de que los tratamientos que usted está realizando realmente están funcionando. Cada vez que realice su tratamiento de mastitis, revise al tercer ordeño, si el tratamiento es correcto y la ubre responde satisfactoriamente, la nueva lectura de MASTIMILK le debe indicar un número inferior de lectura, si por el contrario, el animal no responde o bien empeora con el tratamiento, la lectura de MASTIMILK será igual o superior respectivamente.

El uso de MASTIMILK es imprescindible para un buen control de la sanidad de ubre en su explotación.

