



gav-ALLFEED® MASTIMILK

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- No depositar el dispositivo dentro de agua u otros líquidos para su limpieza, ni debajo de chorros de agua de grifos
- Limpiar siempre después de su uso.
- Limpiar después de uso, sólo con un paño humedecido
- Evitar cualquier tipo de golpes al aparato.
- No dejar el aparato al sol o en cualquier otra fuente de calor directo.
- Si se observa suciedad u oxidación de los conductores, se pueden limpiar con un paño humedecido con acetona.
- Es aconsejable guardar Masttimilk con papel absorbente en el pozal, para evitar la oxidación de los detectores electrónicos.
- Evitar que entre cualquier tipo de líquido, (especialmente leche) por el conector de carga de la batería.

INSTRUCCIONES DE CALIBRACIÓN DE MASTIMILK

- 1.- Encender MASTIMILK manteniendo presionado el botón ON/OFF
Mastimilk debe estar en posición perfectamente horizontal apoyado y estable en una mesa
- 2.- Rellenar el pozal con el líquido calibrador
- 3.- Presionar el botón OK durante 5 seg
- 4.- Presionar por segunda vez el botón Ok, durante 5 seg

Si se ha equilibrado correctamente, con el líquido de calibración deberá marcar un UH entre 4,7 y 5,1

Nota : el líquido de calibración debe estar preferiblemente a 25 °c

Pueden existir ligeros cambios de lectura en función de los cambios de temperatura y de la homogeneidad de las muestras.

RECOMENDAMOS TRABAJAR LOS PROTOCOLOS DE SANIDAD DE UBRE, CERTIFICADOS E.L.U.A. – ganaderías libres de uso de antibióticos y antiparasitarios farmacológicos y certificación leche tipo A2 – con gav-ALLFEED LACTOMINT SPRAYGEL PLUS, CDDDIPP FORTE, BALSAMINT

Canal youtube : [gav-allfeed](https://www.youtube.com/gav-allfeed)

www.gav-allfeed.com

www.certificacionelua.com